



SNELGIDS

De eFOLDi Explorer-scooter uitvouwen





eFOLDi

Zet de scooter rechtop voordat u begint in een open ruimte, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen.

Het uitvouwen van de scooter is eenvoudig, met een beetje oefening kun je hem binnen enkele seconden opzetten.

Wij raden u aan om eerst met de scooter te oefenen voordat u voor de eerste keer op pad gaat.

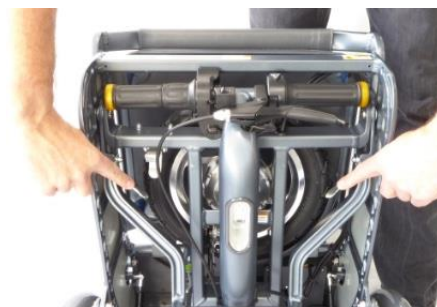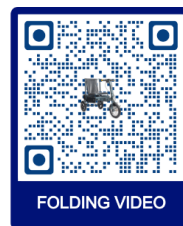

1

Zoek de grendels 'B' en 'C'.



2

Houd de vergrendelingen 'B' en 'C' ingedrukt en...



3

...trek de sleep-/draaghendel rechtop.



4

Laat het stuur los door naar u toe te trekken.



5

Terwijl u het stuur naar beneden en naar binnen duwt, laat u de 'E'-grendel los.



6

Trek de stuurkolom omhoog en over de draaggreep totdat deze op zijn plaats **klikt**.



7

Haak het voorwiel los door krachtig te trekken of te draaien.



8

Laat de scooter voorzichtig op de grond zakken.



9

Trek de stuurkolom rechtop...




10

...en zorg ervoor dat de kolomsleutel op zijn plaats **klikt** onder grendel 'A'.



11

Trek de stoel rechtop.

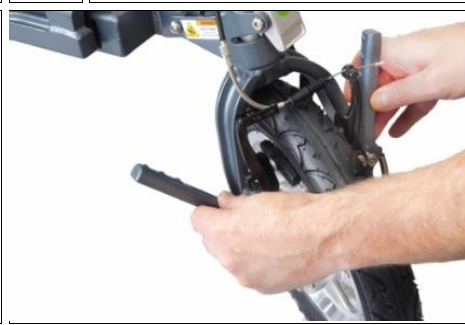

12

Duw de voetsteunen naar beneden. Uw scootmobiel is nu klaar.

eFOLDi Explorer-scooter opvouwen



1 Klap de voetsteunen rechtop.



2 Klap de stoel terug naar beneden.



3 Druk grendel 'A' in en laat deze los.



4 Klap de stuurkolom plat tegen de stoel.



5 Til de scootmobiel rechtop.



6 Zorg ervoor dat het voorwiel plat ligt en met de magneet aan het frame is vergrendeld.



7 Zoek grendel 'D'.



8 Terwijl u de stuurkolom ondersteunt, drukt u op grendel 'D'.



9 ...en breng de stuurkolom over de draaggreep.



10 Druk de stuurkolom in het frame totdat grendel 'E' vergrendelt.



11 Druk het stuur tegen het frame totdat de magneet ze op hun plaats vergrendelt.




12 Houd de grendels 'B' en 'C' ingedrukt en klap de draagbeugel naar beneden.

De eFOLDi Explorer-batterij/oplader



Verwijder de batterij door deze te ontgrendelen met de sleutel en lichte druk uit te oefenen. De batterij beschikt over oplaadpunten en voor het voeden van een mobiel apparaat.

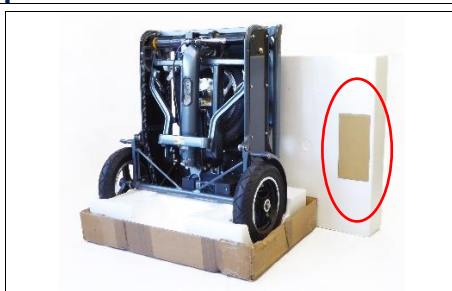

Uw oplader bevindt zich in de basis van een van de polystyreen voeringen.



Steek de sleutel in en draai om aan te zetten, draai de handgreep om te gaan. **Laad de batterij elke 3 maanden op, of wanneer de vermogensmeter 24 of minder aangeeft.**