



GUIDE RAPIDE – FRANÇAIS




eFOLDi

Déplier le fauteuil motorisé eFOLDi

Avant de commencer, placez le fauteuil motorisé dans un espace ouvert, loin des animaux domestiques et des jeunes enfants.

Le dépliage est simple et avec un peu de pratique, vous pourrez le configurer en quelques secondes.

Nous vous conseillons de vous entraîner avec le Power Chair avant de vous aventurer pour la première fois.

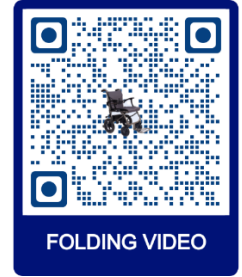

1 Des roues anti-bascule et un chargeur de batterie sont fournis avec votre fauteuil motorisé.

2 Installez les roues anti-bascule. Il suffit d'appuyer dessus et de les verrouiller en place.

3 Dépliez le fauteuil motorisé en poussant simplement le bas du siège vers le bas tout en tirant le levier de déverrouillage vers le haut.



4 Installez les supports d'accoudoir dans les fentes et appuyez dessus jusqu'à ce qu'ils se verrouillent. **Éloignez les câbles des points de pincement.**

5 Prenez l'unité de contrôle et la tige et...

6 ...insérez la tige du contrôleur dans le raccord de l'accoudoir sous l'accoudoir.



7 régler la position du contrôleur et serrer avec le bouton moleté.

8 Retirez la commande de l'accompagnateur de la poche arrière et fixez-la à la barre à l'arrière.

9 Tirez le repose-pieds vers le bas.



10 Installez les coussins de siège comme illustré. Ceux-ci sont maintenus en place par des languettes Velcro. Assurez-vous

11 Insérez les piles jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Votre fauteuil motorisé est maintenant prêt.

12 Allumez le fauteuil motorisé en appuyant sur le bouton POWER. Reportez-vous à votre manuel pour des informations complètes.


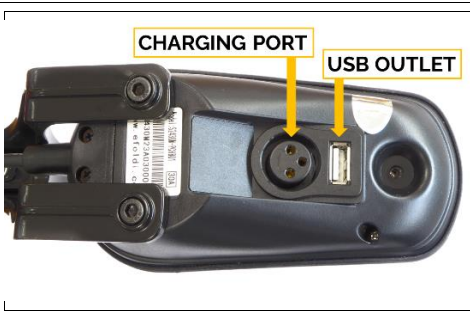

Plier le fauteuil motorisé eFOLDi

		
<p>1 Éteignez l'alimentation à l'aide du bouton POWER de la télécommande. Coupez toujours l'alimentation lorsque le fauteuil n'est pas utilisé pour économiser la batterie.</p>	<p>2 Desserrez légèrement le bouton moleté et retirez le contrôleur. Placez le contrôleur et la ceinture de sécurité sur le coussin de siège. Resserrez le bouton pour éviter toute perte.</p>	<p>3 Retirez la commande du préposé et placez-la dans la poche à l'arrière du fauteuil.</p>
		
<p>4 Vérifiez que les roues avant sont positionnées vers l'avant pour assurer un pliage en douceur. Astuce tirez la chaise vers l'arrière pour aligner les roues.</p>	<p>5 Passez la main sous le bord du siège et tirez la barre de déverrouillage vers le haut pour libérer le siège et.</p>	<p>6 ... tirez le siège vers le haut et vers vous pour plier le fauteuil motorisé. Repliez le repose-pieds.</p>

Chargement de la batterie du fauteuil motorisé eFOLDi

		
<p>Pour charger le fauteuil motorisé, branchez le câble du chargeur dans la base du contrôleur du joystick et branchez la fiche CA sur une prise de courant. Cela chargera les DEUX batteries simultanément.</p>	<p>Pour retirer les batteries pour le voyage ou la charge individuelle, appuyez sur la languette rouge vers le haut et faites glisser la batterie vers l'arrière.</p>	<p>Les batteries peuvent être chargées séparément du fauteuil à l'aide de l'adaptateur court 'queue de cochon' qui doit d'abord être connecté au câble du chargeur.</p>

Fonctionnement du fauteuil motorisé eFOLDi

		
<p>Le contrôleur du combiné a des boutons pour régler la vitesse et des affichages pour indiquer la puissance restante et le réglage de la vitesse.</p> <p>Vous pouvez désactiver la sirène de recul en appuyant sur le bouton indiqué.</p>	<p>Le port de charge de votre fauteuil motorisé est situé sous le combiné pour charger les DEUX batteries simultanément.</p> <p>Il y a aussi une prise USB pour alimenter un téléphone ou un autre périphérique USB.</p>	<p>La commande d'accompagnateur peut être réglée pour ajuster la vitesse de marche d'un accompagnateur/soignant et fournit également une vérification de la batterie.</p> <p>Le levier contrôle le mouvement vers l'arrière ou vers l'avant.</p>