



GUÍA RÁPIDA Despliegue del scooter eFOLDi Explorer




eFOLDi

Antes de comenzar, coloque el scooter en posición vertical en un espacio abierto lejos de mascotas y niños pequeños.

Desplegar el scooter es sencillo, con un poco de práctica podrás configurarlo en segundos.

Te aconsejamos que practiques con el patinete antes de aventurarte por primera vez.

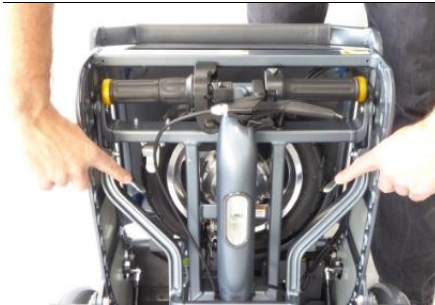

1

Ubique los pestillos 'B' y 'C'.



2

Mantenga presionados los pestillos 'B' y 'C' y...



3

...jale el asa de arrastre/transporte hacia arriba.



4

Suelte el manillar tirando hacia usted.




5

Mientras empuja el manillar hacia abajo y hacia adentro, suelte el pestillo 'E'.



6

Tire de la columna de dirección hacia arriba y sobre el asa de transporte hasta que encaje en su lugar.

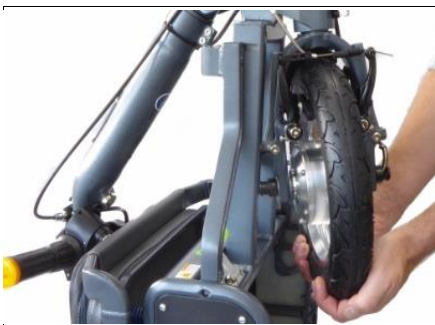

7

Suelte la rueda delantera tirando bruscamente o girando.



8

Baje el scooter al suelo sujetándolo con cuidado.



9

Tire de la columna de dirección hacia arriba...




10

...y asegúrese de que la llave de la columna encaje en su lugar debajo del pestillo 'A'.



11

Tire del respaldo del asiento en posición vertical.

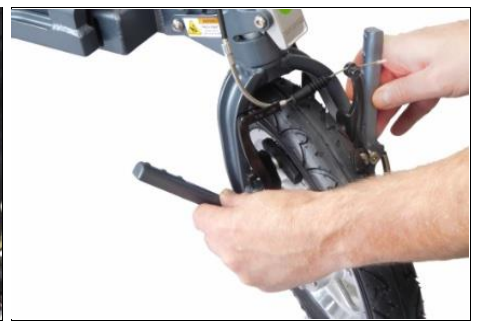




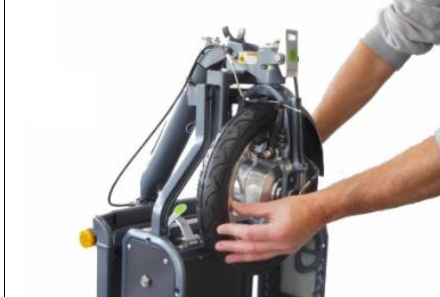








12

Empuje los reposapiés hacia abajo. Su scooter ya está listo.

Tenga en cuenta que este folleto pretende ser solo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte nuestro manual de usuario del producto. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 0800 915 0800 o envíe un correo electrónico a hello@efoldi.com

Plegado de la scooter eFOLDi Explorer

		
1 Doble los reposapiés a una posición vertical.	2 Doble el respaldo del asiento hacia abajo.	3 Presione y suelte el pestillo 'A'.
		
4 Pliegue la columna de dirección contra el asiento.	5 Levante el scooter a una posición vertical.	6 Asegúrese de que la rueda delantera esté plana y bloqueada en el marco por su imán.
		
7 Localice el pestillo 'D'.	8 Mientras sostiene la columna de dirección, presione el pestillo 'D'...	9 ...y coloque la columna de dirección sobre el asa de transporte.
		
10 Presione la columna de dirección contra el marco hasta que se trabe el pestillo 'E'.	11 Presione los manillares contra el marco hasta que el imán los bloquee en su lugar.	12 Mantenga presionados los pestillos 'B' y 'C' y pliegue el asa de transporte hacia abajo.

La batería/cargador eFOLDi Explorer

		
Retire la batería desbloqueando con la llave y aplicando una suave presión. La batería tiene puntos para cargar y alimentar un dispositivo móvil.	Su cargador está ubicado en la base de uno de los revestimientos de poliestireno.	Inserte la llave y gírela para encender, gire la manija para comenzar. Recargue la batería cada 3 meses o cuando el indicador de energía muestre 24 o menos.